


## ANLEITUNG PCR-EINZELTESTUNG: MATERIALÜBERSICHT UND ABLAUFBESCHREIBUNG

### MATERIALÜBERSICHT:

1.

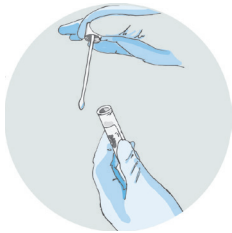

1 Lolli-Abstrichtupfer für Ihre Einzeltestung.

2.



1 Barcode für die Probe (Lolli-Abstrichtupfer).

3.



1 Plastiktüte für den Versand.

4.




1 QR-Code für Ihre Registrierung und für die Befundabfrage – „Anmeldung & Befund“.

## ABLAUFBESCHREIBUNG


### Schritt 1: TESTUNG

1.

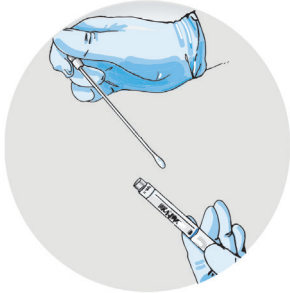

Sie führen den Test selbstständig (mit Ihrem Kind durch), indem Sie (bzw. Ihre Tochter/Ihr Sohn) 30 Sekunden auf dem Abstrichtupfer lutscht. Der Lolli-Abstrichtupfer (erkennbar an dem integrierten Röhrchen) wird nach dem Test fest verschlossen.

2.

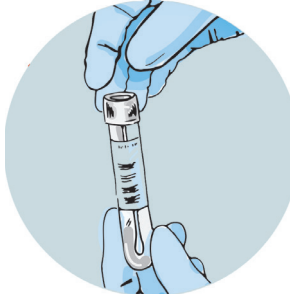

Bitte bekleben Sie das (integrierte) Röhrchen senkrecht und zentral mit dem beigefügten Barcode „Probe-Einzeltestung“. Bitte verkleben Sie **nicht** den Verschluss.

**Bitte schreiben Sie den Namen des Kindes auf das Röhrchen!**




3.



Legen Sie das (integrierte) Röhrchen für die Einzeltestung in eine Plastiktüte.

### Schritt 2: REGISTRIERUNG IHRER PATIENTENDATEN

4.

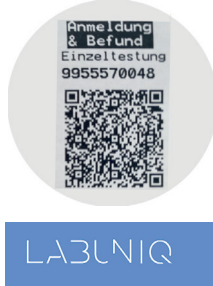

Bitte entnehmen Sie die „Anleitung zur REGISTRIERUNG der PCR-EINZELTESTUNG“ und erfassen die Patientendaten und die QR-Code-No. im LABUNIQ-Portal.

Dieser Barcode dient auch der Befundabfrage.

### Schritt 3: PROBE IN DIE SCHULE BRINGEN

5.



Nach erfolgreicher Erfassung der Patientendaten in LABUNIQ muss die Probe **bis spätestens 08:30 Uhr** am darauffolgenden Tag von Ihnen in die Schule gebracht werden.

**Wir nehmen die Plastiktüte mit der Probe am Törchen entgegen.**